



ALTA PROTECCIÓN.
FÁCIL MONTAJE.
> CÓMODO Y LIGERO.
> FÁCIL LIMPIEZA.
> REUTILIZABLE.
> RESISTENTE.
> PERSONALIZABLE.


ESTE PROTECTOR ESTÁ **FABRICADO EN ESPAÑA** UTILIZANDO LOS SIGUIENTES MATERIALES: POLIPROPILENO, PET, ABS GOMA EVA / PU.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

01


PRESENTACIÓN
ASÍ RECIBES TU PROTECTOR COVID-19

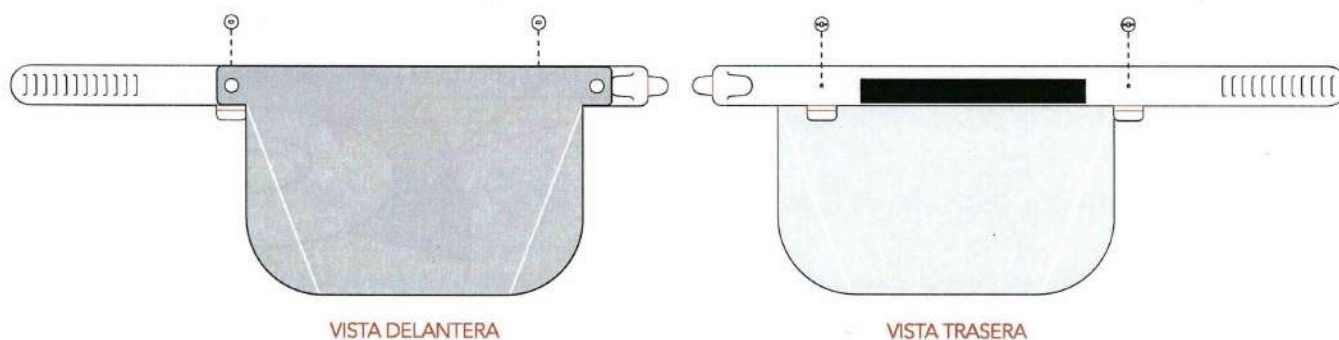

02

MONTAJE DE LA PANTALLA TRANSPARENTE

Coloca el botón en su posición y presiona para introducir el pincho del botón en su agujero.

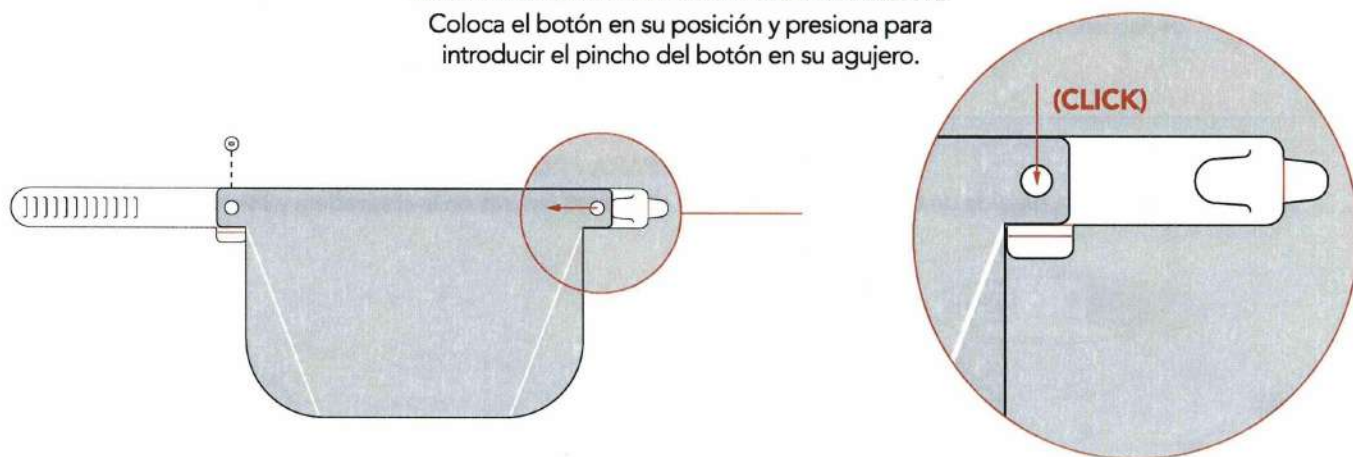

03

TOPES PARA LA PANTALLA PROTECTORA

Dobla las dos solapas de la abrazadera hacia delante formando una "U".
(Tienen que quedar dobladas hacia el lado contrario a la goma negra)





PROFESIONAL
VERSION




Te aconsejamos poner el nombre en tu protector y lavar la pantalla tantas veces sea necesario con alcohol.

04

CIERRE DE BOTONES

Para una mayor seguridad y fijación de la pantalla protectora, puedes colocar las dos piezas de bloqueo que encontrarás sueltas presionando fuerte sobre los pinchos de los dos botones.

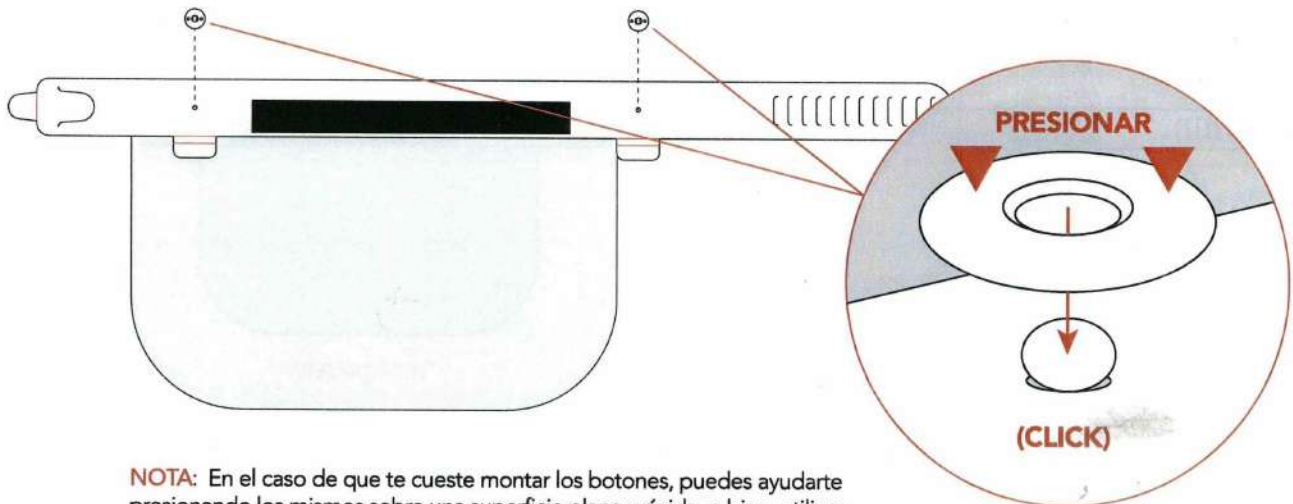


NOTA: En el caso de que te cueste montar los botones, puedes ayudarte presionando los mismos sobre una superficie plana y rígida, o bien, utilizar un pequeño martillo o alicates para presionar con más fuerza.

05

PROTECTOR LISTO PARA PROTEGERTE

Ajusta el protector a la medida de tu cabeza utilizando las diferentes ranuras de la abrazadera y solapas de enganche.

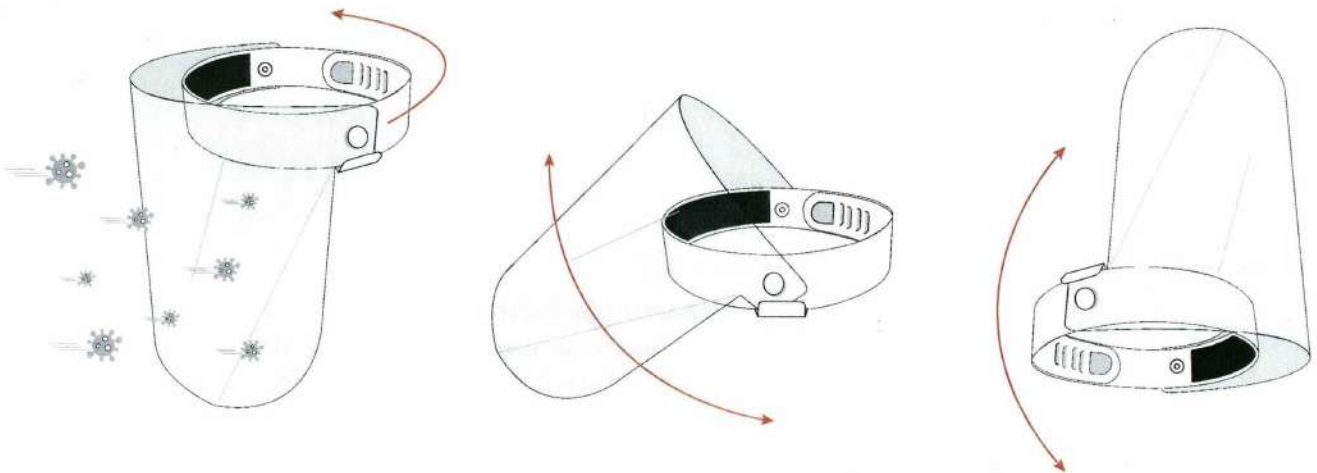

“ NOS IMPORTAS MUCHO. **CUÍDATE!!!** ”